

Anwendungshinweise

Das Solaris® Goldbad supra ist in einem GAMMAT free Gerät der Firma Gramm GmbH einsetzbar.

Ein Aktivator ist nicht notwendig.


Die zum Abscheiden erforderliche Goldbadmenge ist der entsprechenden Anzeige des GAMMAT free Gerätes zu entnehmen.

Die Einstellungen aller übrigen Geräteparameter sind der original Arbeitsanleitung zu entnehmen.


Die Stege sollten separat galvanisiert und nicht mit Kronen kombiniert werden.

Recycling:

Für eine effektive Ausarbeitung des Restgoldes empfehlen wir einen dreifachen Durchlauf im Recyclingmodus.

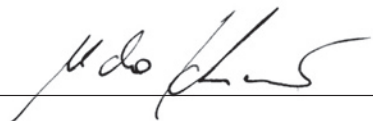

Dr. Udo Schusser
Leiter Forschung und Entwicklung

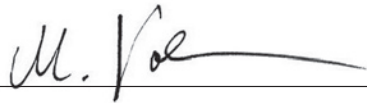

Dr. Markus Vollmann
Leiter Anwendungstechnik