


Import von Brenn- bzw. Pressprogrammen im ProFire®-Ofen


1. Zuerst wird das Zip-Archiv mit den Brennprogrammen auf einem USB Stick entpackt.
2. Nach dem Einschalten des Ofens erscheint folgende Bildschirmmaske

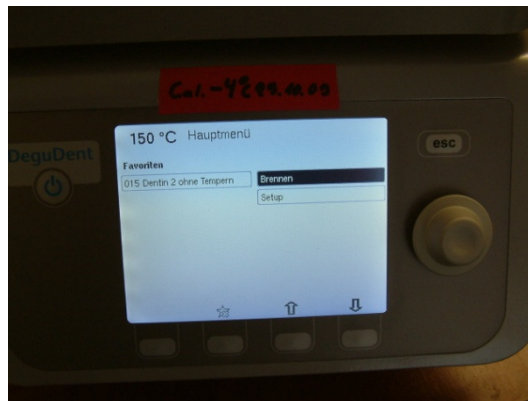


3. Anschließend wird der USB Stick eingesetzt





4. Es erscheint das USB Menü auf dem Bildschirm

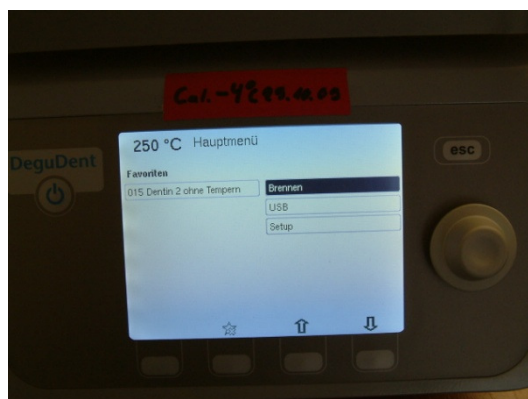


5. Jetzt können im Ordner „USB/Brennprogramme“ oder „USB/Pressprogramme“ die zu importierenden Programme gewählt ...

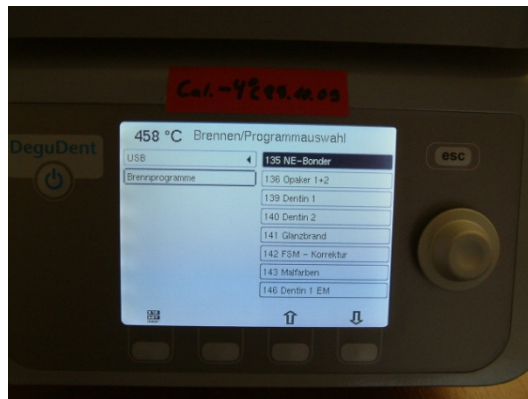


6. ... oder auch Programme aus entsprechenden Produktordnern selektiert werden

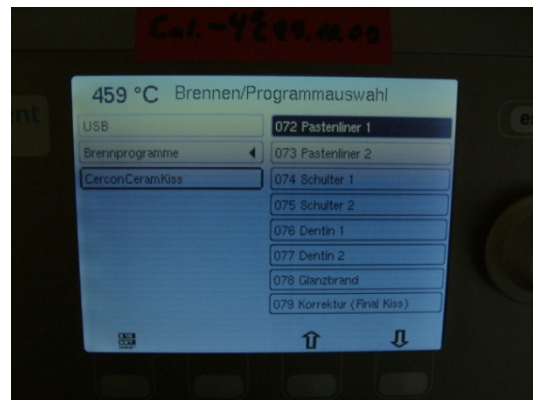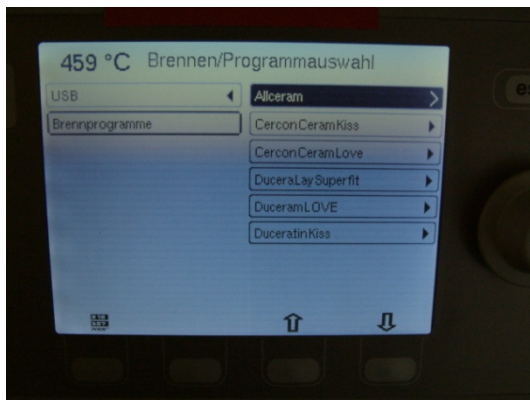



7. Durch Drücken des Softkeys „F1“ (ganz links) können Programme zum Import markiert werden. Dies wird durch das Symbol „>“ vor dem Programmnamen gekennzeichnet.

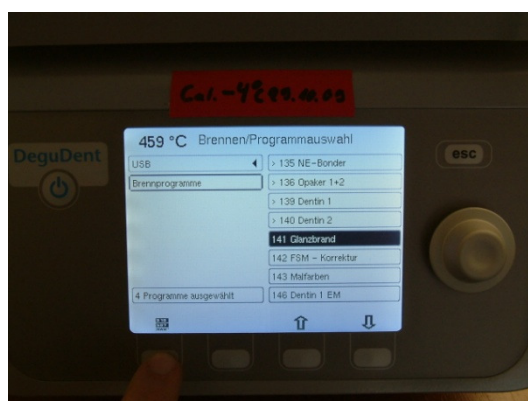

8. Anschließend wird das Auswahlräd längere Zeit gedrückt bis das Menü zum Speichern der Daten erscheint.

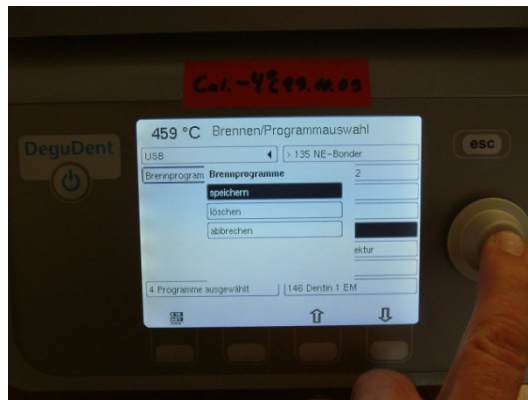

9. Jetzt wird im Individualbereich eine freie Programmnummer als Startposition für den Import gewählt

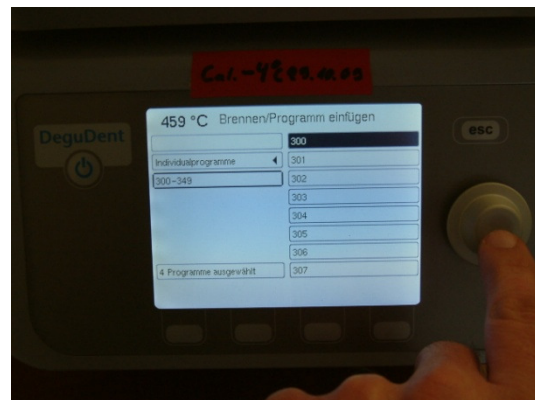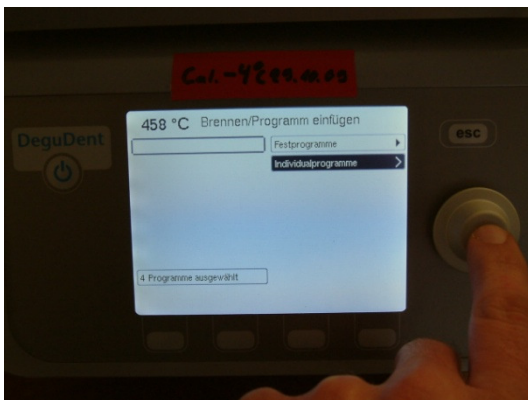

10. Durch erneutes Drücken des Auswahlrades werden die neuen Programme an dieser Stelle eingefügt.

