

Anleitung zum Download von Programm Updates

Update-Datei (Update Duceragold love.zip) für den ProFire Keramikofen:

- Brennprogramme Duceragold love
- Korrektur der NEM- Brennprogramme Duceram love

Entpacken Sie den Zip-Ordner und speichern Sie die Update-Datei auf der obersten Ebene (nicht in einen Ordner kopieren) des USB-Sticks ab, der beim Ofen mitgeliefert wurde. Verwenden Sie nur diesen USB-Stick!

Stecken Sie den Stick in den ausgeschalteten Ofen und schalten diesen ein. Das Update läuft automatisch beim Start ab, anschließend führt der Ofen einen Selbsttest durch. Sobald sich der Ofen im Hauptmenü befindet, können Sie den Stick wieder entnehmen.

Führen Sie einen Neustart aus.

Schauen Sie zur Kontrolle in den Festprogrammen nach, ob die Duceragold love Brennprogramme installiert wurden.

Das Brennprogramm Update hat weder Einfluss auf das Betriebssystem noch auf den bestehenden Individualbereich.