



# Anleitung zur Erstellung einer Sicherungskopie der Individualprogramme und des Software Updates

## 1. Erstellen eines Backup (Sicherungskopie) der Individualprogramme beim ProFire.


Stecken Sie einen USB-Stick in eine der beiden USB-Schnittstellen auf der rechten Seite des ProFire Keramikofens. Im Hauptmenü wird dann der USB-Stick angezeigt.

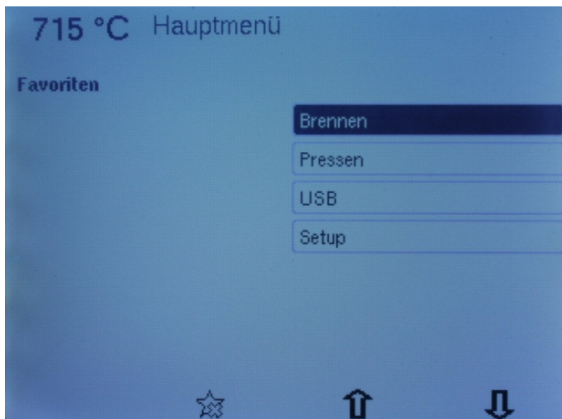


USB-Stick im Hauptmenü.  
das Jogdail drücken

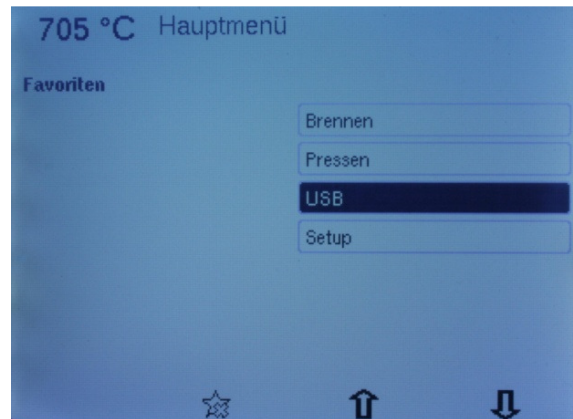


Mit dem Jogdail den USB-Stick auswählen und

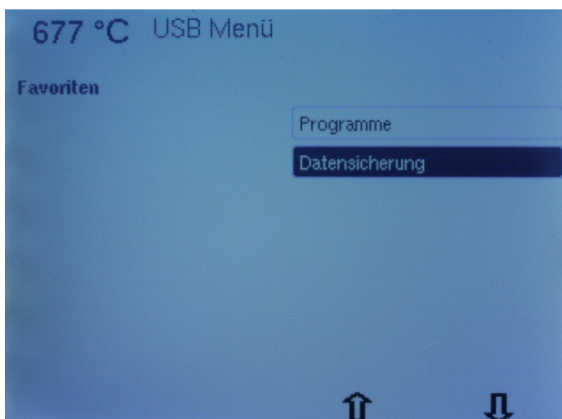


Es erscheint das USB Menü. Mit dem Jogdail  
Datensicherung auswählen und durch drücken  
auf das Jogdial bestätigen.

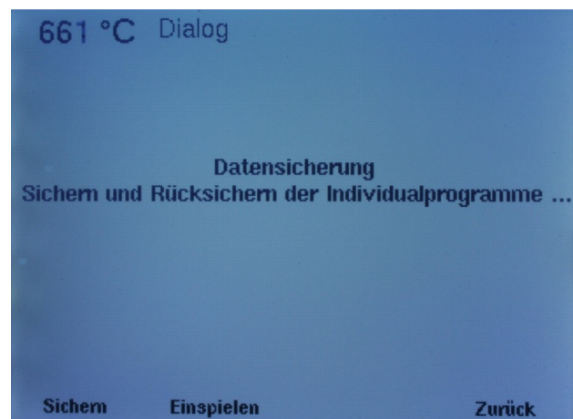


Es erscheint ein Dialog-Fenster.

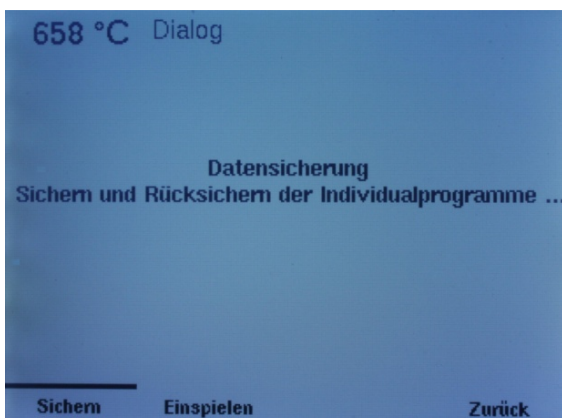


Die Taste unterhalb des Schriftzugs „Sichern“  
betätigen.

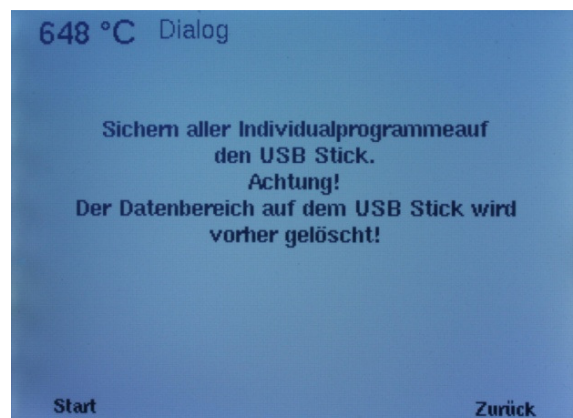


Es erscheint ein weiteres Hinweisenfenster.

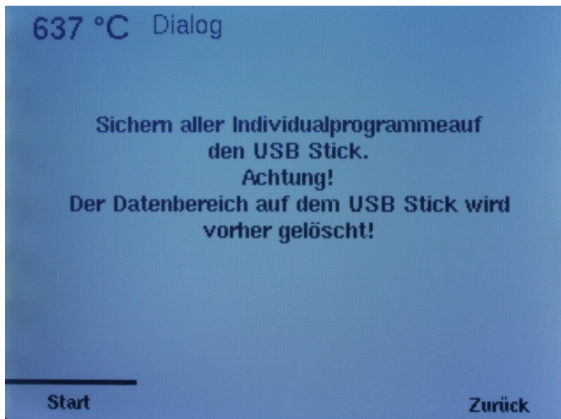

Jetzt die Taste unterhalb des Schriftzugs „Start“ drücken, um die Datensicherung durchzuführen.

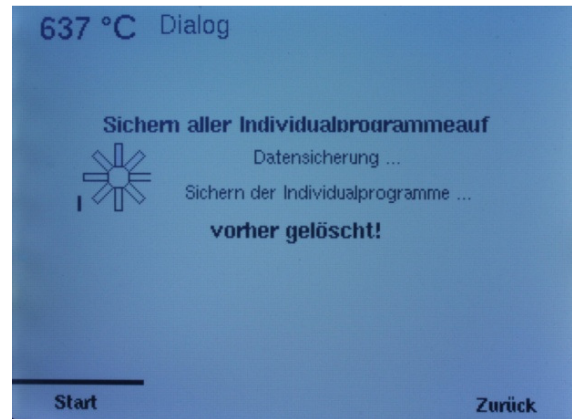


Das Backup wird erstellt.

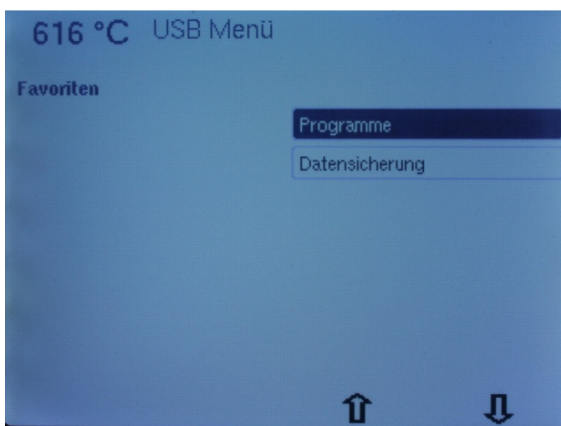


Danach gelangt man wieder in das USB Menü.



## 2. Überprüfen ob das Backup erfolgreich erstellt wurde.

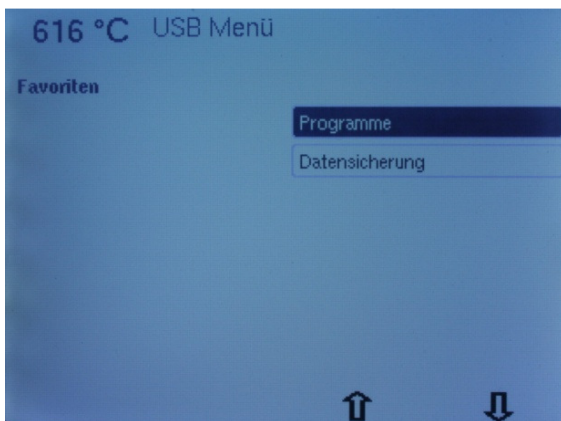

Zum Überprüfen, ob das Backup erfolgreich war, aus dem USB-Menü heraus auf durch drücken auf das Jogdial die Auswahl „Programme“ bestätigen.

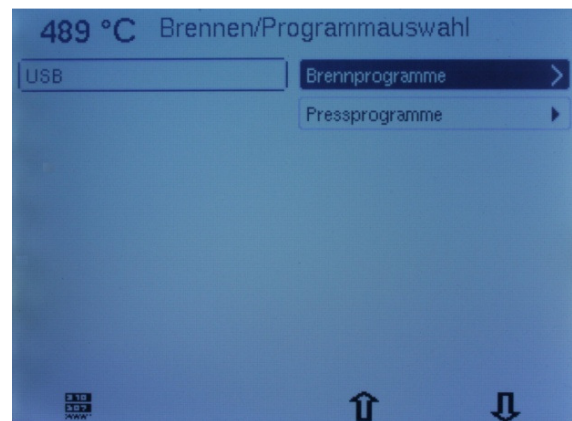

Es erscheint die Auswahl „Brennprogramme“. Bei einem ProFire press noch zusätzlich die Auswahl „Pressprogramme“.

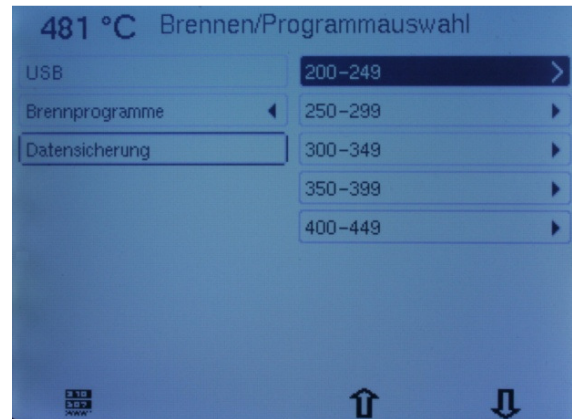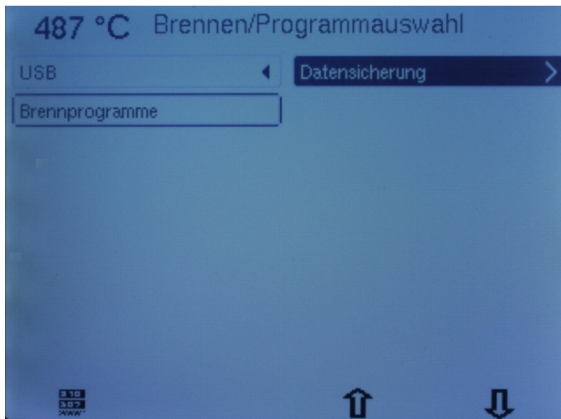

Bei einem erfolgreichen Backup muss durch betätigen der Auswahl „Brennprogramme“ durch das Jogdial die Auswahl „Datensicherung“ erscheinen. Ist diese Auswahl nicht zu sehen, muss das Backup wiederholt werden. Gegebenenfalls muss der USB-Stick neu

Durch bestätigen der Auswahl „Datensicherung“, durch drücken auf das Jogdial, erscheinen die Individualprogrammplätze.

### 3. Software update beim ProFire compact / press.

Laden Sie die Zip-Datei mit dem ProFire update mit Hilfe eines handelsüblichen PC´s oder Laptop von der DeguDent Homepage im Internet unter folgendem Link herunter:


[http://www.degudent.de/Kommunikation\\_und\\_Service/Download/Geraete/Geraete\\_Direkt/Download\\_Geraete\\_Direktvertrieb.asp](http://www.degudent.de/Kommunikation_und_Service/Download/Geraete/Geraete_Direkt/Download_Geraete_Direktvertrieb.asp)


Entpacken Sie die Datei auf einen USB-Stick. Auf dem USB-Stick muss sich jetzt folgende Datei befinden:

**pf.1.43.B5714.sp2.tgz**

Stecken Sie den USB-Stick in eine der beiden USB-Schnittstellen auf der rechten Seite des ProFire Keramikofens und schalten Sie das Gerät ein.

Das Software update läuft automatisch ab. Dabei sind unter anderem folgende Screens zu sehen:

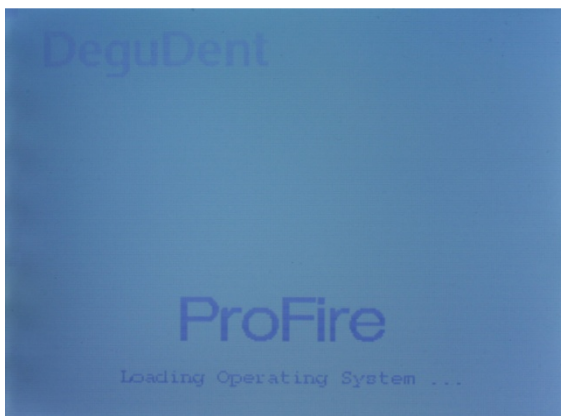


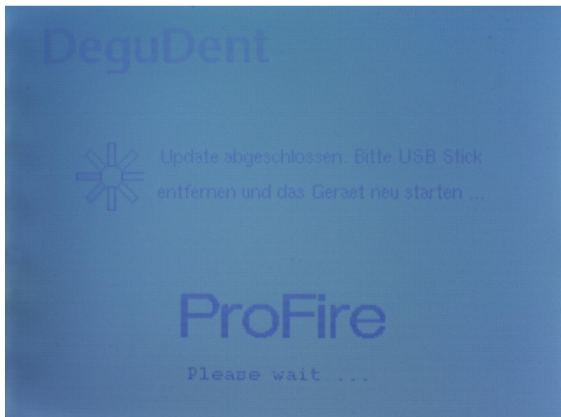


Nach Beendigung des Software updates, den USB Stick entfernen und das Gerät am Hauptschalter aus und wieder einschalten

#### 4. Einspielen eines Backup der Individualprogramme beim ProFire.


Stecken Sie den USB-Stick auf dem sich das Backup befindet in eine der beiden USB-Schnittstellen auf der rechten Seite des ProFire Keramikofens. Im Hauptmenü wird dann der USB-Stick angezeigt.

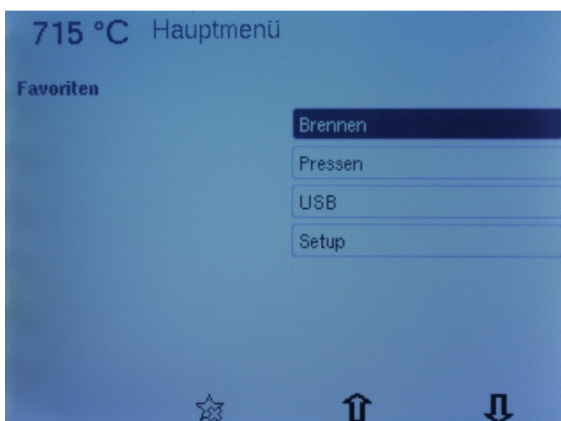


USB-Stick im Hauptmenü. das Jogdial drücken.

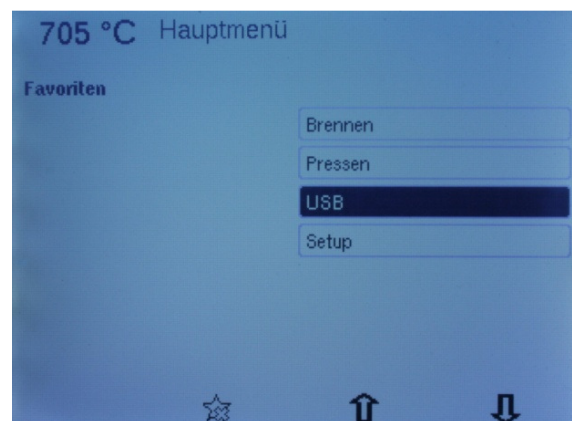


Mit dem Jogdial den USB-Stick auswählen und

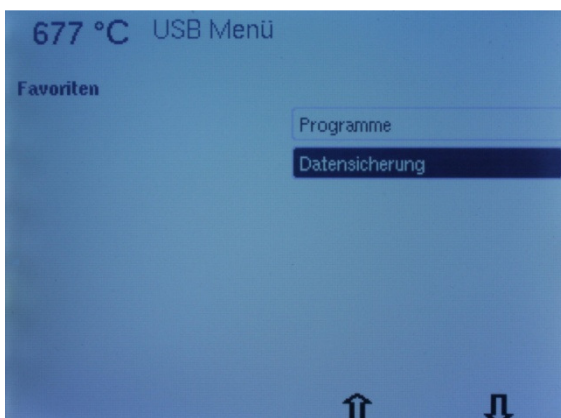


Es erscheint das USB Menü. Mit dem Jogdial „Datensicherung“ auswählen und durch drücken auf das Jogdial bestätigen.

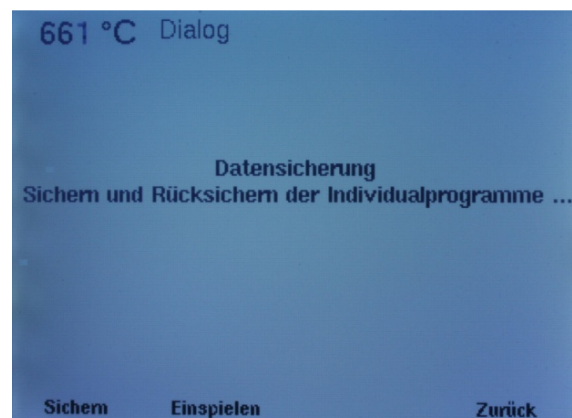


Es erscheint ein Dialog-Fenster.

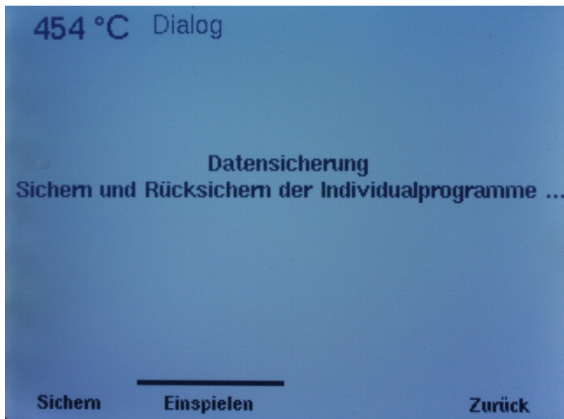


Die Taste unterhalb des Schriftzugs „Einspielen“ betätigen.

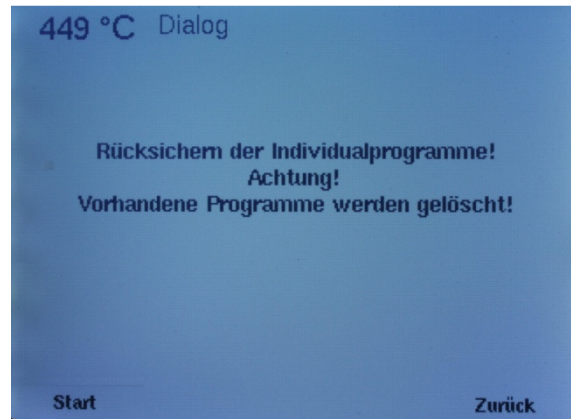


Es erscheint ein weiteres Hinweifenster.

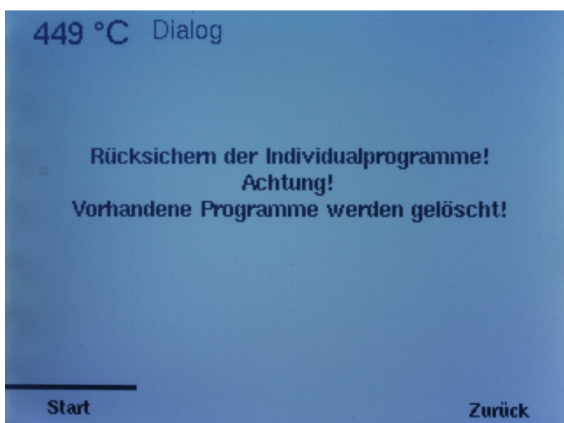

Jetzt die Taste unterhalb des Schriftzugs „Start“ drücken, um die Datenrücksicherung durchzuführen.

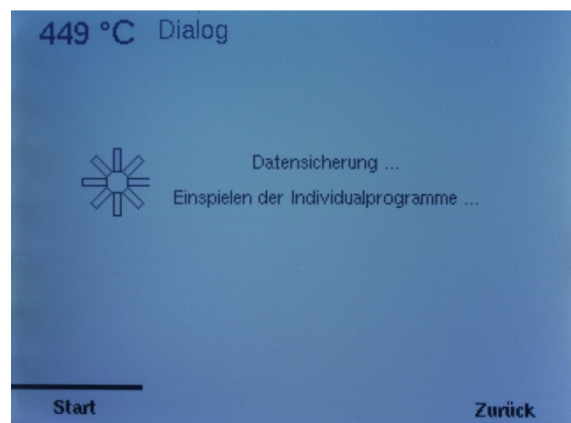

Die Individualprogramme werden eingespielt.

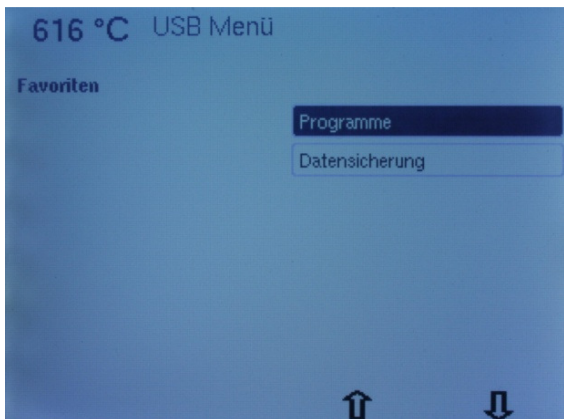

Danach gelangt man wieder ins USB-Menü. Durch drücken der Taste-ESC kommt man sich wieder im Hauptmenü.