

# Kurzanleitung Multimat® NT/NTpress

Technische Hotline:

Tel: 0180-23 24 666 (zum Ortstarif)

Detaillierte Informationen erhalten Sie in der Arbeitsanleitung. Gültig ab Version 2.0.62

#	Aktion	Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5
		Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt 10
1	Ein-/Ausschalten	Kippschalter ein	Manuellen Selbsttest starten	Nach Beendigung des Selbsttest 1 x weiter drücken!	Nach Erscheinen des Hauptmenüs ist der Ofen betriebsbereit.	
2	Lift auf/ab	Sensorfeld drücken				
3	Programm aufrufen	Sensorfeld drücken	Programmnummer über Ziffernfeld eingeben	Bestätigen mit		
4	Programm suchen über PRESSEN oder BRENNEN	Sensorfeld drücken  oder	Fest- oder Individualprogr. auswählen	Scrollbar antippen, hoch oder runter auswählen	Ordner mit gewünschter Keramik auswählen	Brenn- bzw. Pressprogramm auswählen
5	Programm suchen über	Fest- oder Individualprogr. auswählen	Scrollbar antippen, hoch oder runter auswählen	Ordner mit gewünschter Keramik auswählen	Brenn- bzw. Pressprogramm auswählen	
6	Programm starten/abbrechen	Sensorfeld drücken  oder	Fest- oder Individualprogr. auswählen	Start Sensorfeld berühren	Stop: Sensorfeld berühren	Bei Stop, Hinweisfenster mit JA bestätigen
7	Brennparameter vor dem Brand verändern (einmalig)	Programm wie in Aktion 3-5 beschrieben aufrufen	Brennparameter auswählen	Wert über Ziffernfeld verändern	Bestätigen mit	Zum Starten Sensorfeld drücken  oder
8	Brennparameter während des Brennens ändern (einmalig)	Programm wie in Aktion 3-5 beschrieben aufrufen und wie in Aktion 6 beschrieben starten	Von Grafikdarstellung zu Parameter wechseln	Wert über Ziffernfeld verändern	Bestätigen mit	
9	Schnellkühlen aktivieren	Sensorfeld drücken				
10	Stand-by aktivieren	Im Hauptmenü Sensorfeld drücken				
11	Individualisieren eines bestehenden Programmes	Programm wie in Aktion 3-5 beschrieben aufrufen	Parameter auswählen	Wert über Ziffernfeld verändern	Bestätigen mit	Zum Starten Sensorfeld drücken  oder
12	Speichern von Festprogrammen auf Individualprogramme	Datenmanager öffnen	Festprogrammbereich auswählen	Festprogramm über Auswahlfunktion auswählen	Bearbeiten anklicken	Kopieren auswählen
		Sensorfeld Weitere anklicken	Individualbereich auswählen	Name des Programmes ändern u. numerischen Speicherplatz vergeben	Bestätigen mit	
13	Programm oder Ordner neu anlegen	Im Hauptmenü Sensorfeld drücken	Brenn- bzw. Pressprogramm (individual) auswählen, antippen	Sensorfeld bearbeiten antippen	Sensorfeld drücken (Progr. o. Ordner)	Brennverfahren auswählen
		Parameter eingeben	Sensorfeld drücken	Programmname und -nummer eingeben	Bestätigen mit	
14	Einstellungen Hauptmenü ändern	Sensorfeld antippen	EINSTELLUNG antippen	EINSTELLUNGEN mit Ziffernfeld individualisieren	Bestätigen mit	
15	Favoriten einfügen	Programm/Ordner wie in Aktion 3-5 beschrieben aufrufen	Favoritenfunktion mit STERN aktivieren	Programm bzw. Ordner auswählen. Der Stern des Ordners / Progr. wird gelb	Maske der Favoritenplätze öffnet sich. Platz auswählen durch Antippen	Favorit wird nun im Hauptmenü direkt angezeigt.
16	Favoriten löschen mit	Maske der Favoritenplätze öffnet sich	Den zu löschenden Favorit durch Antippen auswählen.	Favorit wird im Hauptmenü nicht mehr angezeigt		