

Kurzanleitung Multimat® Easy

Detaillierte Informationen erhalten Sie in der Arbeitsanleitung.

Technische Hotline:

Tel: 0180-23 24 666 (zum Ortstarif)

D

#	Aktion	Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6
1	Ein-/Ausschalten	Kippschalter ein					
2	Stand-by	Taste on/off drücken					
3	Lift auf/ab	Taste drücken					
4	Programm aufrufen	Taste drücken	Mit Zehnertastatur Programmnummer eingeben	Mit Entertaste bestätigen			
5	Programmieren	Taste Enter drücken	Mit Cursortasten Brennparameter abfahren	Mit Zehnertastatur oder Brennparameter verändern	Mit Entertaste bestätigen		
6	Programm speichern	Taste drücken	Mit Zehnertastatur Programmnummer eingeben	Mit Entertaste bestätigen			
7	Programm starten/abbrechen	Taste start/stop drücken					
8	Programm kopieren	Taste drücken	Mit Zehnertastatur Programmnummer des zu kopierenden Programms eingeben	Mit Entertaste bestätigen	Taste drücken	Mit Zehnertastatur Programmnummer eingeben	Mit Entertaste bestätigen
9	Brennparameter während des Brennens oder für einen Brand verändern	Taste Enter drücken	Mit Cursortasten Brennparameter abfahren	Mit Zehnertastatur Brennparameter verändern	Mit Entertaste bestätigen		
10	Menüeinstellungen	Taste drücken	Mit Cursortasten Menüpunkt auswählen und mit Entertaste bestätigen	Mit Cursortasten Menüpunkt auswählen und mit Entertaste bestätigen	Mit Cursortasten oder mit Zehnertastatur Parameter eingeben	Mit Entertaste bestätigen	Taste zurück so oft drücken, bis Programm wieder erscheint
11	Schnellkühlen aktivieren	Taste drücken					
12	Schnellkühlen ausschalten	Taste drücken					
13	Informationsmeldungen bestätigen	Taste zurück für Nein Entertaste für ja					