

Econolloy Au

Goldreduzierte Legierung zur Anfertigung von Zahnrestaurationen
(aufbrennfähig)

Technische Daten:

Typ	extrahart
Farbe	hellgelb
REF	1421 0002
Indikation	Mehrflächenfüllungen, Kronen, Fräsarbeiten, Brücken jeder Spannweite
Zusammensetzung in Massen-%	
Au + Pt - Gruppenmetalle	48,9
Gold (Au)	33,0
Platin (Pt)	1,0
Palladium (Pd)	14,8
Silber (Ag)	43,0
Indium (In)	8,0
Iridium (Ir)	0,1
Niob (Nb)	0,1
Schmelzintervall (°C)	1010-1060
Vorwärmtemperatur (°C)	800
Gießtemperatur (°C)	1250
Mittlerer linearer WAK $\mu\text{m}/\text{m}\cdot\text{K}$	25-500 °C 17,2 25-600 °C 17,6
Vickershärte HV 5	b : 190 a : 230
0,2% - Dehngrenze (N/mm^2)*	b : 480 a : 570
Zugfestigkeit (N/mm^2)*	b : 630 a : 630
Bruchdehnung (%)*	b : 4 w : 6
Dichte (g/cm^3)	12,7

b = erreichbare Eigenschaften nach der keramischen Verblendung

w = weich (15 min / 800 °C)

a = ausgehärtet 15 min/ 800 °C + 15 min/ 550 °C

*Messung an Proben nach DIN EN ISO 9693

Nur zum dentalen Gebrauch!

Gegenanzeigen

Nicht anwenden bei erwiesener Überempfindlichkeit auf ein oder mehrere in der Legierung enthaltene Metalle.

Nebenwirkung

Möglich sind Allergien gegen in der Legierung enthaltene Metalle sowie elektrochemisch bedingte Missempfindungen. Systemische Nebenwirkungen von in der Legierung enthaltenen Metallen werden in Einzelfällen behauptet.

Wechselwirkungen

Okklusalen und approximalen Kontakt unterschiedlicher Legierungstypen vermeiden.

Warnhinweise

Bitte beachten Sie beim Umgang mit Dentallegierungen, dass Stäube und Dämpfe nicht eingeatmet werden. Verwenden Sie zum Schutz vor Stäuben und Dämpfen geeignete Absauganlagen und zusätzlich einen Gesichts- oder Atemschutz.

Verarbeitungshinweise

Die Verarbeitung und Bearbeitung der Legierung weist gegenüber den Ihnen bekannten Edelmetall-Dentallegierungen von DeguDent keine Besonderheiten auf. Berücksichtigen Sie aber bitte das Schmelzintervall von 1010-1060 °C beim Einstellen der Brenntemperatur für die Dentalkeramik und beim Löten. Überprüfen und kalibrieren Sie Ihren Keramikofen dafür in diesem Temperaturbereich.

Modellieren

Achten Sie beim Modellieren und Ausarbeiten der Gerüste darauf, dass die Mindestwandstärke von 0,3 mm für Einzelkronen und 0,5 mm für Pfeilerkronen nicht unterschritten wird. Beim Ein- und Anguss von Konstruktionselementen (KE) oder Implantatanteilen müssen diese gut „ummantelt“ werden (ca. 0,5 mm), damit die Unterschiede im Wärmeausdehnungskoeffizient nicht zu Sprüngen in der Dentalkeramik führen.

Die Mindestanforderungen zur Kronenwanddicke dienen der Stabilität des Metallgerüsts und des Metall-Keramik-Verbundes. Dadurch wird unter anderem erreicht, dass sich beim Aufbrennen der Keramik die Pfeilerkronen nicht aufweiten (marginal creep) und die Gerüste nicht verziehen. Die Formstabilität des Gerüsts bei den Oxidations- und Keramikbränden nimmt mit größeren Wandstärken und Querschnitten zu.

Anbringen der Gusskanäle

Das in Wachs modellierte Brückengerüst muss mit ausreichend dimensionierten Gusskanälen versehen werden.

Balkenguss:

Der Durchmesser des Zuführungskanals beträgt 3 – 4 mm. Der Verteilerkanal hat einen Durchmesser von 4 – 5 mm, je nach Volumen des Gussobjektes. Das Volumen vom Balken soll dem des Gussobjektes entsprechen. Der Abstand zwischen Verteilerkanal und Wachsobjekt beträgt 5 – 8 mm und hat einen Durchmesser von 3 mm.

Um Gerüstverzüge zu vermeiden wird empfohlen die interdentalen Verbindungen ausreichend stark zu dimensionieren. Durch das Anbringen von palatinalen Girlanden kommt es zu einer zusätzlichen Versteifung des Gerüsts.

(Abbildungen vgl. S. 11 im Prospekt ‚Edelmetall-Dentallegierungen‘)

Einbetten

Einbetten in phosphatgebundenen Einbettmassen (z.B. Deguvest® F, CF und SR). Für das Schnellaufheizen empfehlen wir Deguvest Impuls® oder SR.

(Abbildung vgl. S. 12 im Prospekt ‚Edelmetall-Dentallegierungen‘)

Wachsaustreiben / Vorwärmen

Bei 300 °C und 800 °C je nach Größe der Gusskuvette:

Bei Verwendung von Modellierkunststoffen oder beim gusskuvettenfreien Gießen ist die Reduzierung der Temperatur beim Auswachsen im vorgeheizten Ofen um ca. 50°C empfehlenswert.

Gusskuvettengröße	1x 20 min
	3x 30 min
	6x 45 min
	9x 60 min

Schmelzen und Gießen

Econolloy Au wird in widerstandsbeheizten Gießgeräten (z.B. Multicast® compact, Prestomat® compact) im Graphittiegel und im Flammgießgerät (z.B. Motorcast compact) in der Keramikschemelzmulde sicher verarbeitet.

Schmelzpulver: Veriflux®; Veriflux®P

Schmelzintervall	1010-1060 °C
Gießtemperatur	1250 °C

Weitererhitzungszeiten nach dem vollständigen Aufschmelzen der Legierung:

Widerstandsbeheiztes Gießgerät	30 s
Propan-Sauerstoff-Gießgerät	5-10 s
HF-Gießgerät	5-10 s
Lichtbogen-Gießgerät	5-10 s

Bitte beachten Sie, dass die Weitererhitzungszeit im Prestomat® compact 15 s beträgt. Bei der Wiederverwendung sollte mindestens 1/3 Neumaterial eingesetzt werden. Vor der Wiederverwendung müssen Gusskanäle und Gusskegel zur gründlichen Entfernung von Oxiden und Einbettmasseresten abgestrahlt werden.

Ausbetten

Nach dem Gießen wird die Gussküvette auf Raumtemperatur abgekühlt. Die Einbettmassenform ca. 15 min wässern und anschließend mit einer Gipszange vorsichtig mehrfach spalten. Das Objekt ist nach dieser Methode staubarm von der Einbettmasse zu befreien. Letzte Einbettmassenreste können herausgestichelt oder vorsichtig mit 50 µm Al_2O_3 , maximal 2 bar Druck von der Einbettmasse abgestrahlt werden.

Keinen Hammer zum Ausbetten der Objekte verwenden!

Ausarbeiten

Econolloy Au wird mit kreuzverzahnten Hartmetallfräsen ausgearbeitet. Es wird vorzugsweise in eine Richtung gearbeitet.

Econolloy Au wird nicht mit Diamantschleifkörpern und Steinen bearbeitet!

Gerüstkonditionierung und Oxidieren

Das mit Aluminiumoxid (Al_2O_3), Körnung 110 µm, Druck ca. 2 bar, abgestrahlte Gerüst muss grundsätzlich nicht oxidiert werden.

Das Oxidieren kann bei Bedarf bei 800 °C 5 min atmosphärisch erfolgen.

Um die mechanische Belastung beim Oxidbrand und bei den nachfolgenden Keramikbränden so weit wie möglich zu minimieren, ist eine ausreichende Abstützung des Gerüsts erforderlich. Es wird empfohlen, möglichst alle Pfeilerzähne mit Brenntägerstiften zu unterstützen.

Anschließend wird das Oxid durch nochmaliges Strahlen mit Al_2O_3 , Körnung 110 µm, Druck ca. 2 bar entfernt.

Das Metallgerüst wird unter fließendem Wasser gut abgebürstet und gründlich mit dem Dampfstrahlgerät gereinigt.

Fügetechnik

Attachment-, Reparatur- oder Verbindungs-lötung:

Beim Löten mit der Flamme oder im temperaturgeregelten Ofen müssen genügend große Lotflächen vorhanden sein. Der ideale Lötspalt beträgt max. 0,2 mm. Wird ein Objekt zum Löten getrennt, so empfiehlt sich deshalb die Verwendung einer möglichst dünnen Trennscheibe.

Gestalten Sie den Lötblock so klein wie möglich und wärmen Sie ihn im Ofen bis 450 °C vor. Platzieren Sie dazu schon das Flussmittel.

Flammenlötung

Bitte achten Sie darauf, bei der Flammenlötung lokale Überhitzungen zu vermeiden.

Ofenlötung

Bei der Ofenlötung nach dem Brand sollte die Endtemperatur des Keramikofens mindestens 50 °C über der Arbeitstemperatur eingestellt werden. Es muss dabei auf die WAK spezifischen Abkühlbedingungen der Keramik geachtet werden.

Löten vor dem Brand

Degunorm[®]-Lot 930 (AT 930 °C)

Löten nach dem Brand

Stabilor[®]-Lot 710 (AT 710 °C)

Flussmittel

T / DS1

Lasern

Für Econolloy Au steht kein Laserschweißdraht zur Verfügung. Empfehlung: Degunorm[®].

Aufbrennen der Dentalkeramik

Zur keramischen Verblendung eignen sich Dentalkeramiken wie z. B. Duceragold[®] Kiss. Die Empfehlungen der Keramikhersteller sind zu beachten. Alle Keramikbrände ab dem ersten Dentinbrand erfolgen mit Langzeitabkühlung (für Duceragold[®] Kiss: 3 min. tempern bei 720 °C).

Aushärten

Härte und Festigkeit nach dem Guss oder der keramischen Verblendung sind bei Econolloy Au für jede physiologisch vertretbare Brückenspannweite mit einer genügenden Reserve für extreme Bissverhältnisse ausreichend.

Vergüten

15 min / 550 °C

Oxidentfernung

Nach dem Aufbrennen der Dentalkeramik bzw. nach der letzten Wärmebehandlung sollten die Oxide gründlich entfernt werden, um die Korrosionsbeständigkeit der Legierung nicht zu beeinträchtigen. Dieses kann durch mechanisches Abtragen erfolgen.

Bitte beachten Sie unsere ausführliche Arbeitsanleitung "Edelmetall-Dentallegierungen - Verarbeitungshinweise für nicht aufbrennfähige und aufbrennfähige Legierungen" sowie die Hinweise in unserem EG-Sicherheitsdatenblatt.